


МІОРІА

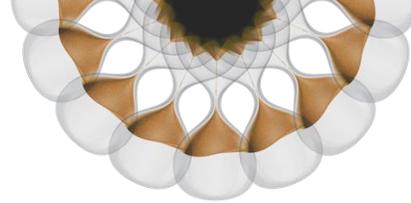


МІОРІА ТОРИК

## МіОрія и МіОрія Торік – первые мягкие линзы в Украине для контроля миопии у детей и подростков

Линзы семейства МіОрія для контроля близорукости имеют уникальный мультифокальный дизайн с центром для дали, изготавливаются из силикон-гидрогелевого материала, что обеспечивает здоровье и комфорт ношения.

*Линзы семейства МіОрія специально разработаны для контроля близорукости.* Уникальный дизайн передней поверхности позволяет увеличивать глубину фокуса, а также уменьшать прогрессирование миопии за счет уменьшения периферического гиперметропического дефокуса.

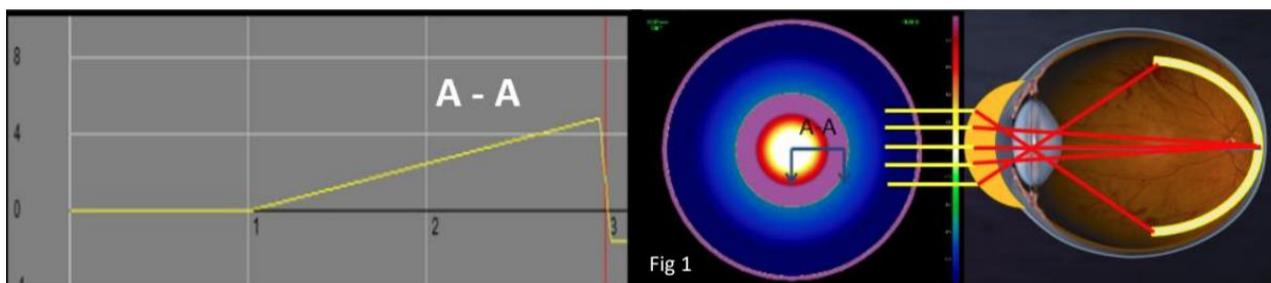

Конструкция МіОрія Торік представляет собой заднюю торическую поверхность с призматическим балластом, с гравированной контрольной меткой на 270°.

Силикон-гидрогелевые линзы плановой замены рекомендованы для 3 месяцев ношения.

Линзы имеют широкий диапазон параметров для точной и комфортной посадки с учётом индивидуального радиуса и диаметра роговицы.

### Характеристики линзы **МіОрія**

<b>Материал</b>	Filcon V3
<b>Содержание воды</b>	74,0%
<b>Отенок линзы</b>	прозрачный
<b>Светопропускание</b>	99,0%
<b>Модуль упругости (МПа)</b>	0,35
<b>Кислородная проницаемость (ДК)</b>	60,0 x 10 <sup>-11</sup> при 35°
<b>Кислородная трансмиссия (ДК/Т)</b>	37,5 x 10 <sup>-9</sup> @ -3,00DS
<b>Базовая кривизна</b>	МіОрія - от 7,20 до 8,80 с шагом 0,20 мм МіОрія Торік - от 7,50 до 9,60 с шагом 0,30 мм
<b>Диаметр</b>	От 13,50 до 15,00 с шагом 0,5 мм
<b>Толщина центра</b>	0,16 мм @ -3,00DS
<b>Оптическая зона</b>	8,00 мм @ -3,00DS
<b>Сила Сферы</b>	От +15,00 до -15,00 с шагом 0,25DS
<b>Аддидация</b>	До +3,00 с шагом 0,50DS

## Характеристики линзы

## MiOria Toric

Сила цилиндра До -6,00DS с шагом 0,25DS

Ось Любая

Упаковка Виаль

- ✓ Рефракция линзы: полная коррекция для дали в пересчете по вертексному расстоянию
- ✓ Аддидация: первичный выбор +2,5Д
- ✓ Диаметр линзы: NVID +2.5 мм
- ✓ Базовая кривизна- см. таблицу

Вибір базової кривизни сферичної лінзи:

Середнє К	7.30	7.40	7.50	7.60	7.70	7.80	7.90	8.00	8.10	8.20
Діаметр										
13.50	7.40	7.60								
14.00	7.40	7.60	7.60	7.80	8.00	8.00	8.20			
14.50		7.80	7.80	7.80	8.00	8.00	8.20	8.40	8.40	8.60
15.00					8.20	8.20	8.40	8.40	8.60	8.60

Вибір базової кривизни торичної лінзи:

Середнє К	7.30	7.40	7.50	7.60	7.70	7.80	7.90	8.00	8.10	8.20
Діаметр										
13.50	7.50	7.50								
14.00	7.50	7.50	7.80	7.80	8.10	8.10	8.40			
14.50		7.80	8.10	8.10	8.10	8.40	8.40	8.40	8.70	8.70
15.00					8.40	8.40	8.70	8.70	9.00	9.00

*Сочетание новой технологии производства с современными материалами обеспечивает:*

- Отличную остроту зрения;
- Высокий уровень комфорта;
- Поддерживает здоровье глаз.

Алгоритм подбора линз прост, не требует дополнительного оборудования и может осуществляться как в оптике, так и в кабинете офтальмолога!

Алексеева Катерина Володимирівна  
лікар-офтальмолог, медичний консультант компанії Soflex  
[advice@kristall.world](mailto:advice@kristall.world) тел: 067 516 8303

Степанець Світлана Іванівна  
директор  
[info@kristall.world](mailto:info@kristall.world) тел: 067 551 5002



[www.kristall.world](http://www.kristall.world)

